



Devolución de la bomba InfuBLOCK®

Estimado paciente:

Gracias por confiar el tratamiento de manejo del dolor a InfuSystem. Como último paso en su atención, se le indica que devuelva la bomba de manejo del dolor y su estuche negro a InfuSystem. Hemos simplificado este paso para usted. Solo necesita la caja de envío prepagada que le entregaron cuando fue dado de alta.

Lea detenidamente las instrucciones a continuación.



Al finalizar la infusión, oprima el botón de encendido/apagado y, luego, oprima "Yes" (Si) apagar la bomba. Esto apagará la bomba por completo.



Coloque la bolsa plástica ziplock con la bomba y el estuche negro dentro de la caja de devolución prepagada.



Quite las pilas adicionales de la caja para la devolución.



Selle la caja utilizando los adhesivos suministrados.



Retire la bolsa de medicamento del estuche negro de la bomba.



Envíe la caja a través del Servicio Postal de los Estados Unidos. Puede colocar la caja de envío dentro de su buzón, entregársela al cartero o llevarla a la oficina postal local.



Corte los tubos del lado derecho e izquierdo de la bomba y descarte junto con el catéter y la bolsa de medicamento.



El franqueo ya está pagado. No se requieren gastos de envío adicionales.



Coloque la bomba en la bolsa plástica ziplock proporcionada (aún tendrá parte de los tubos).

¿Tiene preguntas sobre cómo devolver la bomba? Llame a la línea directa de InfuSystem las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 1-844-724-6123.



La caja está lista para ser enviada. NO quite la etiqueta de envío prepagado que ya viene pegada en la caja.